



Software di gestione dei dati sui lipidi Mission
Guida per l'utente

Sommario

1.	Panoramica.....	1
1.1	Informazioni sul software di gestione dei dati sui lipidi Mission.....	1
1.2	Requisiti di sistema.....	1
1.3	Materiali richiesti	1
2.	Istruzioni per l'amministratore.....	2
2.1	Installazione	2
2.2	Configurazione	2
2.3	Istruzioni per la disinstallazione	5
2.4	Esecuzione del software di gestione dei dati sui lipidi Mission (solo amministratori).....	6
2.4.1	Password dimenticata (solo amministratori).....	6
2.4.2	Impostazioni amministratore	6
2.4.2.1	Scheda Aggiungi/Gestisci utenti	7
2.4.2.2	Scheda Informazioni sulla struttura	8
2.4.2.3	Scheda Impostazioni avanzate	9
2.4.2.4	Scheda Impostazioni report.....	10
3.	Istruzioni generali.....	11
3.1	Esecuzione del software.....	11
3.2	Primo accesso/Password dimenticata	11
3.3	Impostazioni standard	12
3.3.1	Scheda Impostazioni report.....	12
3.3.2	Scheda Account personale/Modifica password	13
4.	Schermata Home.....	13
5.	Visita in studio	14

5.1	Cancellazione della memoria del misuratore.....	14
5.2	Immissione della data di nascita.....	15
5.2.1	Record paziente trovato.....	15
5.2.2	Record paziente non trovato (creazione di un record paziente).....	16
5.3	Esecuzione del test usando il misuratore Mission.....	16
5.4	Trasferimento dei dati dei test.....	16
5.5	Report paziente.....	18
6.	Evento di screening.....	19
6.1	Denominare l'evento di screening e fornire la data dell'evento.....	20
6.2	Cancellazione della memoria del misuratore.....	21
6.3	Immissione della data di nascita.....	21
6.3.1	Record paziente trovato.....	22
6.3.2	Record paziente non trovato (creazione di un record paziente).....	23
6.4	Esecuzione del test usando il misuratore Mission.....	23
6.5	Trasferimento dei dati dei test.....	23
6.6	Report paziente.....	25
6.7	Terminare l'evento di screening.....	27
7.	Trasferisci risultati test.....	27
7.1	Esecuzione del trasferimento dei dati collettivo.....	28
7.2	Assegnazione dei dati di test ai record paziente.....	29
8.	Record pazienti.....	31
8.1	Accesso ai record pazienti esistenti.....	31
8.2	Accesso agli eventi di screening precedenti.....	36
9.	Sicurezza del computer.....	39

1. Panoramica

1.1 Informazioni sul software di gestione dei dati sui lipidi Mission

Questo software è progettato per le visite in studio dei pazienti e gli eventi di screening della comunità. Consente all'utente di trasferire rapidamente i dati dei test dal misuratore a un PC, creare e gestire in modo sicuro record elettronici contenenti dati di test correnti/archiviati e informazioni sanitarie standard e fornire ai pazienti un report sanitario personalizzato e aggiornato dei lipidi ad ogni visita.

Il report paziente personalizzato include i risultati dei test correnti del paziente, confrontati con i valori di riferimento standard, per il colesterolo totale, i trigliceridi, l'HDL, il colesterolo LDL calcolato e il rapporto colesterolo totale/HDL calcolato. È un utile strumento educativo che calcola automaticamente il rischio a 10 anni del paziente di malattia coronarica, utilizzando gli algoritmi di punteggio Framingham o PROCAM. Se nelle impostazioni del software è selezionato l'algoritmo di Framingham, il report calcolerà anche l'"Età del cuore" dell'individuo, un altro indicatore predittivo della salute cardiovascolare, basato su fattori di rischio noti.

Nota: Un computer eseguirà solo una copia di questo software e si collegherà con un misuratore alla volta.

1.2 Requisiti di sistema

I seguenti sono i requisiti minimi per il software di gestione dei dati sui lipidi Mission:

Sistema operativo:	Win 7 Home Premium – 32 bit Win 7 Pro – 64 bit Win 8,1 Pro – 64 bit Win 10 Pro – 64 bit
Memoria:	1 GB
Spazio su disco rigido:	500 MB per l'installazione del software e l'espansione del database dei pazienti
Porta di connessione:	Porta USB disponibile
Display:	1024 x 768 o superiore

1.3 Materiali richiesti

- Misuratore del colesterolo Mission -o- Misuratore del pannello lipidico Mission
- Cavo USB Mission

2. Istruzioni per l'amministratore

2.1 Installazione

NOTA: Durante il processo di installazione, assicurarsi che il cavo USB sia disconnesso dal computer. Non collegarlo al computer fino al completamento dell'installazione del software.

Per installare, fare clic sull'icona del software di gestione dei dati sui lipidi Mission e seguire le istruzioni.

2.2 Configurazione

La finestra di configurazione apparirà automaticamente al termine dell'installazione.

NOTA: Se il computer si spegne durante l'installazione, il processo di configurazione rimarrà incompleto. Per riavviare il processo di configurazione, è necessario reinstallare il software.

1. La configurazione inizia dalla schermata "Seleziona lingua". Selezionare la lingua preferita dal menu a discesa e fare clic sul pulsante "Continua".
2. Inserire le informazioni sulla struttura nella schermata "Registrazione struttura" e fare clic sul pulsante "Continua".

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0

Registrazione struttura

* Nome struttura: *Obbligatorio

Indirizzo 1:

Indirizzo 2:

Città:

Stato/Provincia: Codice postale: Paese:

Numero di telefono: Indirizzo Web:

[Continua](#)

3. Inserire i propri dati nella schermata “Credenziali amministratore primario”. (Per Nome utente, utilizzare l’ID email aziendale o creare un sistema di denominazione per sé stessi e altri utenti). Fare clic sul pulsante “Continua”.

Mission® Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0

Credenziali amministratore primario

* Nome: * Cognome: * Obbligatorio

* Nome utente:

* Password:

* Conferma password:
8-20 caratteri

Continua ▶

4. Nella schermata “Aggiungi utenti”, inserire le informazioni per ciascun individuo che sarà autorizzato a utilizzare il software e ad accedere alle informazioni dei pazienti. Immettere ciascun utente, uno alla volta, e fare clic sul pulsante “Aggiungi utente” dopo ogni voce per salvare.

Mission® Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0

Aggiungi utenti

* Nome: * Cognome: * Obbligatorio

Creare nomi utenti e password iniziali univoche per l’accesso di ogni nuovo utente.

* Nome utente: * Password:(8-20 caratteri):

* Privilegi di amministratore: No Si

Cancella Aggiungi utente

Quando tutti gli utenti sono stati inseriti (utenti aggiuntivi possono essere aggiunti in seguito), fare clic sul pulsante “Continua”.

NOTA: I privilegi amministrativi includono:

- Aggiunta, modifica, eliminazione di record utente dal software
- Modifica delle informazioni della struttura nel software
- Modifica delle impostazioni del software
- Esportazione dei dati pazienti in file di testo CSV
- Creazione di un backup del database dei pazienti
- Accesso alla cronologia dei test della soluzione di controllo
- Caricamento del logo aziendale per report paziente personalizzato (facoltativo)

* Privilegi di amministratore:

No Si

NOTA: Un utente avrà lo stato “In sospeso” fino al primo accesso. Quindi, lo stato cambierà in “Attivo”.

Gestisci utenti

Cognome, Nome	Stato
Ferrari, Giulia	In sospeso
Gallo, Gloria	In sospeso
Russo, Sofia	Attivo

Continua ▶

5. Selezionare le impostazioni del software e fare clic sul pulsante “Continua”.

Impostazioni software

Visualizzazione ora:	<input type="radio"/> 12 ore	<input checked="" type="radio"/> 24 ore	
Visualizzazione data:	<input type="radio"/> MM-GG-AAAA	<input checked="" type="radio"/> GG-MM-AAAA	<input type="radio"/> AAAA-MM-GG
Algoritmo di valutazione del rischio:	<input type="radio"/> Framingham	<input checked="" type="radio"/> PROCAM	
Analiti - Unità di misura:	<input type="radio"/> mg/dL	<input checked="" type="radio"/> mmol/L	
Altezza - Unità di misura:	<input type="radio"/> in	<input checked="" type="radio"/> cm	
Peso - Unità di misura:	<input type="radio"/> lb	<input checked="" type="radio"/> kg	

Le impostazioni del report possono essere personalizzate dopo l'accesso. (Vedere la scheda Impostazioni nella barra di navigazione in alto).

Continua ▶

Nota: Si avrà la possibilità di personalizzare le impostazioni del report dopo aver effettuato l'accesso.

6. Una volta completata la configurazione, verrà visualizzata una schermata di attivazione dell'account. Inserire il nuovo nome utente e la password per attivare l'account.
7. Verrà richiesto di riavviare il computer.
8. Fornire nomi utente e password (temporanei) a tutti i nuovi utenti autorizzati per il primo accesso.

2.3 Istruzioni per la disinstallazione

1. Aprire il menu del software installato di Windows o il Pannello di controllo. (Nel Pannello di controllo, andare su Programmi e funzionalità. Se il Pannello di controllo è in visualizzazione Categorie, andare su Disinstalla un programma).
2. Individuare l'icona del software di gestione dei dati sui lipidi Mission.
3. Seguire la procedura standard di Windows per disinstallare il programma.

2.4 Esecuzione del software di gestione dei dati sui lipidi Mission (solo amministratori)

Dopo l'installazione, l'icona del software sarà visibile nel menu Start del computer. Se è stato creato un collegamento durante l'installazione, sarà visibile anche sul desktop. Fare doppio clic sull'icona mostrata di seguito per avviare il programma.




2.4.1 Password dimenticata (solo amministratori)

Se si dimentica la password e l'utente è l'unico con privilegi amministrativi nell'organizzazione, contattare l'assistenza tecnica di ACON Laboratories (techsupport@aconlabs.com). Se utenti aggiuntivi all'interno dell'organizzazione dispongono di privilegi amministrativi, anch'essi hanno la possibilità di visualizzare e modificare tutte le password (sia Amministratori sia utenti standard) nella scheda "Aggiungi/Gestisci utenti" (situata in "Impostazioni" nella barra di navigazione in alto).

2.4.2 Impostazioni amministratore

Il pulsante Impostazioni si trova nella barra di navigazione in alto.

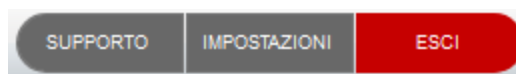

Se si dispone di privilegi amministrativi, verrà visualizzata la schermata seguente:

✕

Impostazioni amministratore

Aggiungi/Gestisci utenti
Informazioni struttura
Impostazioni avanzate
Impostazioni report

Aggiungi utenti

* Nome:

* Nome utente:

* Cognome: * Obbligatorio

* Password(8-20 caratteri):

* Privilegi di amministratore:
 No
 Sì

Cancella
Aggiungi utente

Gestisci utenti

Cognome, Nome	Stato
Ferrari, Giulia	In sospeso
Gallo, Gloria	In sospeso
Russo, Sofia	Attivo

Se la schermata sopra non viene visualizzata quando si fa clic sul pulsante Impostazioni, contattare l'Amministratore primario del software nella propria struttura.

2.4.2.1 Scheda Aggiungi/Gestisci utenti

- Per aggiungere nuovi utenti, compilare i campi sotto "Aggiungi utenti" e fare clic sul pulsante "Aggiungi utente".

Aggiungi utenti

* Nome:

* Nome utente:

* Cognome: * Obbligatorio

* Password(8-20 caratteri):

* Privilegi di amministratore:
 No
 Sì

Cancella
Aggiungi utente

- Per modificare il file dell'utente, fare clic sul nome dell'utente in "Gestisci utenti" per aprire il file utente per la modifica. Apportare le modifiche e fare clic sul pulsante "Salva".

Gestisci utenti

Cognome, Nome	Stato
Ferrari, Giulia	In sospeso
Gallo, Gloria	In sospeso
Russo, Sofia	Attivo

Modifica utente ✕

* Nome * Cognome

* Nome utente * Password(8-20 caratteri)

Privilegi di amministratore: No Si

- Per eliminare un file utente, fare clic sul nome dell'utente elencato in "Gestisci utenti" per aprire il file dell'utente. Fare clic sul pulsante "Elimina utente". (Mostrato sopra).

2.4.2.2 Scheda Informazioni sulla struttura

Aggiornare le informazioni sulla struttura e fare clic sul pulsante "Salva".

X

Impostazioni amministratore

Aggiungi/Gestisci utentiInformazioni strutturaImpostazioni avanzateImpostazioni report

* Nome struttura: * Obbligatorio

Indirizzo 1:

Indirizzo 2:

Città:

Stato/Provincia: Codice postale: Paese:

Numero di telefono: Indirizzo Web:

CancellaSalva

2.4.2.3 Scheda Impostazioni avanzate

Modificare le impostazioni del software se lo si desidera e fare clic sul pulsante "Salva".

✕

Impostazioni amministratore

Aggiungi/Gestisci utenti
Informazioni struttura
Impostazioni avanzate
Impostazioni report

Visualizzazione ora:	<input type="radio"/> 12 ore <input checked="" type="radio"/> 24 ore
Visualizzazione data:	<input type="radio"/> MM-GG-AAAA <input checked="" type="radio"/> GG-MM-AAAA <input type="radio"/> AAAA-MM-GG
Algoritmo di valutazione del rischio:	<input type="radio"/> Framingham <input checked="" type="radio"/> PROCAM
Analiti - Unità di misura:	<input type="radio"/> mg/dL <input checked="" type="radio"/> mmol/L
Altezza - Unità di misura:	<input type="radio"/> in <input checked="" type="radio"/> cm
Peso - Unità di misura:	<input type="radio"/> lb <input checked="" type="radio"/> kg

Azzera
Salva

Funzioni amministratore avanzato

Selezionare il pulsante seguente.

ESPORTA TUTTI I DATI DEI PAZIENTI

Esporta database pazienti in file di testo CSV

CREA BACKUP

Backup database pazienti

VISUALIZZA REGISTRO DI CONTROLLO

Cronologia test soluzione di controllo

Per le funzioni di amministratore avanzate, fare clic sul pulsante appropriato.

- Esportare il database paziente in un file di testo CSV.
- Creare un backup del database dei pazienti. (Per assistenza nel ripristino dei file, contattare l'assistenza tecnica di ACON Laboratories all'indirizzo techsupport@aconlabs.com).
- Visualizzare la cronologia dei test della soluzione di controllo.

2.4.2.4 Scheda Impostazioni report

Modificare le impostazioni del report se lo si desidera e fare clic sul pulsante "Salva".

X

Impostazioni amministratore


Aggiungi/Gestisci utenti
Informazioni struttura
Impostazioni avanzate
Impostazioni report

Selezionare le informazioni da includere nei report di test.

Nome paziente:	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
ID paziente#:	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Età:	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Altezza/Peso:	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Pressione arteriosa:	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Valutazione del rischio cardiaco:	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Inserire logo struttura:	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

Caricare file logo: Sfoglia

Requisiti file immagine logo: JPEG, PNG, 150 px x 50 px, 150 - 300 dpi raccomandato.



Azzera
Salva

Vedere le sezioni 4-9 per ulteriori informazioni su come utilizzare questo software.

3. Istruzioni generali

3.1 Esecuzione del software

Fare doppio clic sull'icona del software di gestione dei dati sui lipidi Mission mostrata di seguito. Si trova nel menu Start di Windows. Potrebbe anche essere visibile sul desktop del computer, se è stato creato un collegamento.




3.2 Primo accesso/Password dimenticata

L'Amministratore primario fornirà all'utente un nome utente e una password iniziale (temporanea). Durante la prima procedura di accesso, l'account verrà attivato e si avrà la possibilità di modificare la password.

Nota: Se si dimentica la password, contattare l'amministratore.

3.3 Impostazioni standard

Il pulsante Impostazioni si trova nella barra di navigazione in alto.

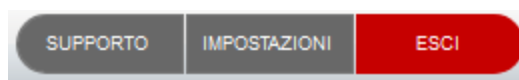

Quando si fa clic sul pulsante Impostazioni, dovrebbe essere visualizzata la schermata seguente:

Una finestra di dialogo intitolata 'Impostazioni' con un pulsante di chiusura in alto a destra. Sotto il titolo, ci sono due pulsanti: 'Impostazioni report' (scelto) e 'Il mio account'. Sotto, c'è una tabella con sei righe di impostazioni, ciascuna con un campo di testo e due pulsanti radio 'Sì' e 'No'. In basso, ci sono due pulsanti: 'Azzera' e 'Salva'.

Impostazioni		
Impostazioni report		
Nome paziente:	<input checked="" type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
ID paziente#:	<input checked="" type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Età:	<input checked="" type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Altezza/Peso:	<input checked="" type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Pressione arteriosa:	<input checked="" type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
Valutazione del rischio cardiaco:	<input checked="" type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No

Se la schermata non viene visualizzata quando si fa clic sul pulsante Impostazioni, contattare l'Amministratore primario del software nella propria struttura.

3.3.1 Scheda Impostazioni report

Modificare le impostazioni del report se lo si desidera e fare clic sul pulsante "Salva".

Impostazioni

Impostazioni report | **Il mio account**

Nome paziente:	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No
ID paziente#:	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No
Età:	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No
Altezza/Peso:	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No
Pressione arteriosa:	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No
Valutazione del rischio cardiaco:	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No

Azzera | Salva

3.3.2 Scheda Account personale/Modifica password

Modificare la password se lo si desidera e fare clic sul pulsante “Salva”.

È consigliabile modificare la password regolarmente.

Impostazioni

Impostazioni report | **Il mio account**

Creare una nuova password.

Password

Conferma password

8-20 caratteri

Cancel | Salva

4. Schermata Home

La schermata Home è la prima schermata della scheda Visita in studio. Appare come la schermata seguente.

Mission® Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

SRUSSO
25-09-2018 08:21:40

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Visita in studio

Data di nascita:

Mese Giorno Anno Ricerca

5. Visita in studio

La modalità Visita in studio (Schermata Home) è utilizzabile in uno studio medico durante un appuntamento con il paziente. Il flusso di lavoro è il seguente:

- 1) Cancellare la memoria del misuratore all'inizio della giornata (opzionale, ma consigliato)
- 2) Porre al paziente alcune domande
- 3) Eseguire il test lipidico; togliere dal misuratore il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati
- 4) Trasferire i dati del test dal misuratore al computer
- 5) Generare un report paziente

5.1 Cancellazione della memoria del misuratore

Per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati, si consiglia di cancellare la memoria del misuratore ogni giorno o più volte alla settimana (a seconda del volume dei test sui lipidi). Per istruzioni su come cancellare la memoria del misuratore, fare clic sul collegamento "Come cancellare la memoria del misuratore?" Questo collegamento porta direttamente alla pagina di supporto, che può anche essere aperta con il pulsante Supporto nella barra di navigazione in alto.

Ottimizza il trasferimento dei dati



[Come cancellare la memoria del misuratore - PDF](#)

Necessario Adobe Acrobat Reader

5.2 Immissione della data di nascita

Fare clic sul pulsante Visita in studio (se non si è già nella schermata Home). Inserire la data di nascita del paziente per individuare o confermare l'esistenza del record paziente nel sistema.

The screenshot shows the Mission software interface. At the top, there is a header with the Mission logo, the text 'Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi', the version 'v1.0.0', and buttons for 'SUPPORTO', 'IMPOSTAZIONI', and 'ESCI'. Below the header, there is a user profile section with a green icon, the name 'srusso', and the date and time '25-09-2018 08:21:40'. A navigation bar contains four buttons: 'VISITA IN STUDIO', 'EVENTO DI SCREENING', 'TRASFERISCI RISULTATI TEST', and 'RECORD PAZIENTI'. The 'VISITA IN STUDIO' button is selected. Below the navigation bar, the 'Visita in studio' section is displayed. It features a form for entering the date of birth, labeled 'Data di nascita:'. The form consists of three dropdown menus for 'Mese', 'Giorno', and 'Anno', followed by a 'Ricerca' button.

5.2.1 Record paziente trovato

Saranno elencati tutti i record paziente associati alla data di nascita inserita. Selezionare il paziente corretto dall'elenco facendo clic sul nome del paziente. Il record paziente si aprirà. Aggiornare le informazioni sui segni vitali del paziente. Confermare le risposte alle domande sulla salute e aggiornare, se necessario. Fare clic su "Salva".

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

SRUSSO
25-09-2018 08:23:36

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Visita in studio

✓ Paziente trovato! Selezionare o aggiungere un nuovo paziente.

Nome completo (cognome, nome)	Data di nascita
Alfonsi, Roberto	01-01-1970
Bianchi, Nina	01-01-1970
Marino, Marco	01-01-1970
Ricci, Luca	01-01-1970
Romano, Angelo	01-01-1970

Annulla Aggiungi nuovo paziente

Se nessuno dei pazienti elencati è il paziente corretto, fare clic su “Aggiungi nuovo paziente”: verrà aperto un nuovo record. Completare tutti i campi e fare clic su “Salva”.

5.2.2 Record paziente non trovato (creazione di un record paziente)

Se non vengono trovati record paziente associati alla data di nascita immessa, verrà aperto un nuovo record. Completare tutti i campi e fare clic su “Salva”.

5.3 Esecuzione del test usando il misuratore Mission

Eeguire test sui lipidi con il misuratore Mission. Consultare il manuale dell’utente del misuratore e/o la guida di riferimento rapido per ulteriori dettagli su come eseguire un test utilizzando il misuratore Mission. I risultati possono essere visualizzati sullo schermo del misuratore entro 2 minuti. Dopo la visualizzazione dei risultati sul misuratore, togliere il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati.

5.4 Trasferimento dei dati dei test

Verificare che il misuratore Mission sia collegato al computer mediante un cavo da USB a mini-USB. Fare clic sul pulsante “Trasferimento dati”.

Nota: Non fare mai clic sul pulsante “Trasferimento dati” prima di aver tolto il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati e di aver collegato il misuratore al computer.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

srusso
25-09-2018 08:24:29

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Visita in studio

L'analisi dei lipidi è semplice come l'ABC!



1 **Otteni un campione**
Utilizzare il pungidito, Trasferimento nella provetta per sangue capillare, Applicare il sangue sulla striscia.



2 **Ricevi i risultati**
CHOL totale, HDL, trigliceridi e LDL calcolato in ≤ 2 min.



3 **Trasferisci dati**
Collegare il misuratore per il colesterolo Mission al PC tramite il cavo USB.

Per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati, si consiglia di cancellare periodicamente la memoria del misuratore.

 [Come cancellare la memoria del misuratore?](#)

Annulla Trasferisci dati

Se il misuratore è un modello precedente (unidirezionale), sullo schermo verranno visualizzate istruzioni speciali che spiegano come avviare in modo rapido e semplice il trasferimento dei dati manualmente.








Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

srusso
25-09-2018 08:25:20

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Visita in studio

La versione del misuratore richiede l'intervento manuale.
Seguire i passaggi seguenti per trasferire i dati dal misuratore al PC.

-   ● Con il misuratore spento, tenere premuto il pulsante centrale finché non viene visualizzato Set screen (Imposta schermo).
-  ● Premere il pulsante → finché sullo schermo del misuratore non viene visualizzato il PC.
-  ● Premere una volta il pulsante centrale per abilitare la comunicazione dei dati.
-  ● Premere nuovamente il pulsante centrale per trasferire i dati al PC.
-  ● Per uscire, premere il pulsante ← finché non viene visualizzata la schermata Exit (Esci).
-  ● Premere il pulsante centrale una volta per accedere alla schermata di analisi del misuratore. Premere nuovamente il pulsante centrale per spegnere.

5.5 Report paziente

Dopo il trasferimento dei dati dei test, verrà generato automaticamente un report paziente personalizzato, che verrà visualizzato come quello mostrato nella pagina successiva. Se sullo schermo non appare il referto paziente personalizzato, verificare che il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati siano stati tolti dal misuratore. Per stampare il report, fare clic sul pulsante "Stampa report". Altrimenti, fare clic sul pulsante "Termina visita paziente" per tornare alla schermata Home senza stampare un report.

Il report paziente contiene informazioni sanitarie di carattere generale, rischio di coronaropatia a 10 anni, "età del cuore" (solo se nelle impostazioni del software è selezionato il metodo del punteggio di Framingham), risultati dei test e tutti i risultati cronologici dei test sui lipidi. Fornire ai pazienti un report personalizzato può servire come strumento educativo e come elemento di motivazione per spingere i pazienti ad apportare cambiamenti nel loro stile di vita. È possibile stampare il referto del paziente con una stampante locale o di rete; tuttavia, per stampare a colori, utilizzare una stampante locale/non inserita in rete.

Nota: Questo software utilizza gli algoritmi di rischio CHD più aggiornati disponibili. Poiché le versioni precedenti del misuratore potrebbero non disporre degli algoritmi aggiornati, è possibile osservare alcune differenze tra il rischio CHD indicato nel report e il rischio CHD generato dal misuratore individualmente.

Nota: Quando nelle impostazioni del software è stato selezionato "Framingham", i calcolatori di rischio a 10 anni e dell'età del cuore nel report si basano sui dati dello studio di Framingham e sono destinati a individui di età compresa tra 30 e 74 anni che non hanno una storia di malattia cardiovascolare (attacco cardiaco, ictus, arteriopatia periferica o insufficienza cardiaca). Il rischio di malattia coronarica (CHD) di

un paziente può essere sovrastimato o sottostimato da questi calcolatori se la loro età non rientra nell'intervallo dell'età di riferimento.”

Nota: Quando nelle impostazioni del software è stato selezionato “PROCAM”, il calcolatore del rischio a 10 anni nel report si basa sui dati dello studio PROCAM ed è utilizzato per stimare il rischio di CHD in uomini di età compresa tra 35 e 65 anni che non hanno una storia di malattie cardiovascolari (attacco cardiaco, ictus, arteriopatia periferica o insufficienza cardiaca). Il rischio di CHD di un paziente può essere sovrastimato o sottostimato da questo calcolatore se la sua età o il sesso non rientrano nei parametri dello studio PROCAM.”

The screenshot displays the Mission software interface for lipid data management. At the top, the title bar reads "Mission® Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi" with version "v1.0.0" and buttons for "SUPPORTO", "IMPOSTAZIONI", and "ESCI". A user profile for "sruoso" is shown with the date and time "25-09-2018 08:26:48". A navigation bar contains "VISITA IN STUDIO", "EVENTO DI SCREENING", "TRASFERISCI RISULTATI TEST", and "RECORD PAZIENTI". The main content area is titled "Report di prova" and shows the test date and time as "Data: 25-09-2018 Ora: 08:26".

Informazioni paziente:

Nome paziente:	Alfonsi, Roberto		ID paziente:	89756	
Sesso:	Uomo	Età:	48		
Altezza:	180 (cm)	Peso:	75 (kg)	Pressione arteriosa:	100 / 80
Tabagismo:	No	Diabete:	No	Trattamento per l'ipertensione:	No

Risultati analisi

RISCHIO CARDIOPATIA CORONARICA A 10 ANNI

4.2%

Lo strumento di valutazione del rischio cardiaco utilizza le informazioni dello studio PROCAM per prevedere il rischio di un attacco cardiaco a 10 anni. Un punteggio di

At the bottom, there are buttons for "Fine visita paziente", "Stampa report", and navigation arrows.

6. Evento di screening

La modalità Evento di screening viene utilizzata in un'impostazione di eventi di screening, ad esempio una farmacia o una "fiera della salute". Il flusso di lavoro è molto simile al flusso di lavoro della Visita in studio ed è composto da quanto segue:

- 1) Denominare l'evento di screening e fornire la data dell'evento
- 2) Cancellare la memoria del misuratore prima dell'evento di screening (facoltativo, ma consigliato)
- 3) Porre al partecipante allo screening alcune domande
- 4) Eseguire il test lipidico; togliere dal misuratore il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati
- 5) Trasferire i dati del test dal misuratore al computer

- 6) Generare un report paziente
- 7) Terminare l'evento di screening

6.1 Denominare l'evento di screening e fornire la data dell'evento

Fare clic sul pulsante Evento di screening. Gli eventi di screening richiedono nomi e date per essere ricercabili nel sistema. Stabilire una convenzione di denominazione coerente per gli eventi (anche con un'ortografia coerente). Ciò renderà più semplice l'estrazione delle informazioni in raggruppamenti organizzati.

Questo software prevede due opzioni per condurre Eventi di screening:

- **I risultati dei test sono trasferiti individualmente**

Sono acquisiti per ciascun partecipante i dati di altezza, peso e pressione sanguigna; l'operatore dello screening pone alcune domande per identificare la persona e i rispettivi fattori di rischio, viene eseguito un test lipidico, i risultati delle analisi sono trasferiti dal misuratore, al partecipante viene consegnato un referto paziente.

- **Tutti i risultati sono trasferiti dopo l'evento**

I partecipanti compilano un questionario. Sono acquisiti i loro dati di altezza, peso e pressione sanguigna e si eseguono i test lipidici. Dopo l'evento, i dati delle analisi sono trasferiti e sono inviati i referti paziente.

The screenshot shows the 'Mission' software interface for 'Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi' (v1.0.2). The user is logged in as 'PrimaryAdministrator' on 15-03-2019 at 10:51:58. The navigation menu includes 'VISITA IN STUDIO', 'EVENTO DI SCREENING' (selected), 'TRASFERISCI RISULTATI TEST', and 'RECORD PAZIENTI'. The main content area is titled 'Evento di screening' and contains the following form fields and options:

- Text input field: 'Nome dell'evento di screening:'
- Date selection: 'Data evento:' with dropdowns for 'Mese', 'Giorno', and 'Anno'.
- Radio button options:
 - Trasferisci individualmente i risultati delle analisi per ciascun
 - Trasferisci tutti i risultati delle analisi dopo l'evento.
- Text: 'Si raccomanda di cancellare la memoria del misuratore prima di ogni evento di'
- Help link: [? Come cancellare la memoria del misuratore?](#)
- Buttons: 'Azzera' and 'Continua'

6.3.1 Record paziente trovato

Saranno elencati tutti i record dei partecipanti allo screening associati alla data di nascita inserita. Selezionare il nome corretto dall'elenco facendo clic sul nome del partecipante. Il record si aprirà. Aggiornare le informazioni sui segni vitali del partecipante. Confermare le risposte alle domande sulla salute e aggiornare, se necessario. Fare clic su "Salva".

Mission® Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

SRUSSO
25-09-2018 08:30:19

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Evento di screening


✔ Paziente trovato! Selezionare o aggiungere un nuovo paziente.

Nome completo (cognome, nome)	Data di nascita
Alfonsi, Roberto	01-01-1970
Bianchi, Nina	01-01-1970
Marino, Marco	01-01-1970
Ricci, Luca	01-01-1970
Romano, Angelo	01-01-1970

Annulla Aggiungi nuovo paziente

Se nessuno dei nomi elencati è il partecipante corretto, fare clic su "Aggiungi nuovo paziente": verrà aperto un nuovo record. Completare tutti i campi e fare clic su "Salva".

Mission® Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

 **srusso**
25-09-2018 08:31:13

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Evento di screening

+ Immettere le informazioni del nuovo paziente.

* Obbligatorio

* Nome: * Cognome: ID paziente:

* Data di nascita: Gen 01 1970

* Sesso: Donna Uomo

Segni vitali: * Altezza: (cm) * Peso: (kg) * Pressione arteriosa: (Sis / Dia) /

* Tabagismo? Sì No

6.3.2 Record paziente non trovato (creazione di un record paziente)

Se non vengono trovati record associati alla data di nascita immessa, verrà aperto un nuovo record. Completare tutti i campi e fare clic su “Salva”.

6.4 Esecuzione del test usando il misuratore Mission

Eseguire test sui lipidi con il misuratore Mission. Consultare il manuale dell'utente del misuratore e/o la guida di riferimento rapido per ulteriori dettagli su come eseguire un test utilizzando il misuratore Mission. I risultati possono essere visualizzati sullo schermo del misuratore entro 2 minuti. Dopo la visualizzazione dei risultati sul misuratore, togliere il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati.

6.5 Trasferimento dei dati dei test

Verificare che il misuratore Mission sia collegato al computer mediante un cavo da USB a mini-USB. Fare clic sul pulsante “Trasferimento dati”.

Nota: Non fare mai clic sul pulsante “Trasferimento dati” prima di aver tolto il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati e di aver collegato il misuratore al computer.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

srusso
25-09-2018 08:32:22

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Evento di screening

L'analisi dei lipidi è semplice come l'ABC!



1 Ottieni un campione
Utilizzare il pungidito. Trasferimento nella provetta per sangue capillare. Applicare il sangue sulla striscia.



2 Ricevi i risultati
CHOL totale, HDL, trigliceridi e LDL calcolato in ≤2 min.



3 Trasferisci dati
Collegare il misuratore per il colesterolo Mission al PC tramite il cavo USB.

Per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati, si consiglia di cancellare periodicamente la memoria del misuratore.

[? Come cancellare la memoria del misuratore?](#)

Se il misuratore è un modello precedente (unidirezionale), sullo schermo verranno visualizzate istruzioni speciali che spiegano come avviare in modo rapido e semplice il trasferimento dei dati manualmente.








Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

srusso
25-09-2018 08:32:59

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Evento di screening

La versione del misuratore richiede l'intervento manuale.
Seguire i passaggi seguenti per trasferire i dati dal misuratore al PC.

-   ● Con il misuratore spento, tenere premuto il pulsante centrale finché non viene visualizzato Set screen (Imposta schermo).
-  ● Premere il pulsante → finché sullo schermo del misuratore non viene visualizzato il PC.
-  ● Premere una volta il pulsante centrale per abilitare la comunicazione dei dati.
-  ● Premere nuovamente il pulsante centrale per trasferire i dati al PC.
-  ● Per uscire, premere il pulsante ← finché non viene visualizzata la schermata Exit (Esci).
-  ● Premere il pulsante centrale una volta per accedere alla schermata di analisi del misuratore. Premere nuovamente il pulsante centrale per spegnere.

6.6 Report paziente

Dopo il trasferimento dei dati dei test, verrà generato automaticamente un report personalizzato, che verrà visualizzato come quello mostrato di seguito. Se sullo schermo non appare il referto paziente personalizzato, verificare che il dispositivo di test/la cartuccia reattiva usati siano stati tolti dal misuratore. Per stampare il report, fare clic sul pulsante "Stampa report". Altrimenti, fare clic sul pulsante "Termina visita paziente" per visualizzare il partecipante allo screening successivo.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

grusso 25-09-2018 08:34:17

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERI RECORD PAZIENTI


Mission Report di prova

EVENTO DI SCREENING: Programma Comunita sane Data: 25-09-2018 Ora: 08:34

Informazioni paziente:

Nome paziente:	Alfonsi, Roberto		ID paziente:	89756	
Sesso:	Uomo	Età:	48		
Altezza:	180 (cm)	Peso:	75 (kg)	Pressione arteriosa:	100 / 80
Tabagismo:	No	Diabete:	No	Trattamento per l'ipertensione:	No

Risultati analisi

 **RISCHIO CARDIOPATIA CORONARICA A 10 ANNI**

Lo strumento di valutazione del rischio cardiaco utilizza le informazioni dello studio PROCAM per prevedere il rischio di un attacco cardiaco a 10 anni. Un punteggio di

Fine visita paziente Stampa report < >

Il report contiene informazioni sanitarie di carattere generale, rischio di coronaropatia a 10 anni, “età del cuore” (solo se nelle impostazioni del software è selezionato il metodo del punteggio di Framingham), risultati dei test e tutti i risultati cronologici dei test sui lipidi. Fornire ai partecipanti un report personalizzato può servire come strumento educativo e come elemento di motivazione per spingere i soggetti ad apportare cambiamenti nel loro stile di vita. È possibile stampare il referto del paziente con una stampante locale o di rete; tuttavia, per stampare a colori, utilizzare una stampante locale/non inserita in rete.

Nota: Questo software utilizza gli algoritmi di rischio CHD più aggiornati disponibili. Poiché le versioni precedenti del misuratore potrebbero non disporre degli algoritmi aggiornati, è possibile osservare alcune differenze tra il rischio CHD indicato nel report e il rischio CHD generato dal misuratore individualmente.

Nota: Quando nelle impostazioni del software è stato selezionato “Framingham”, i calcolatori di rischio a 10 anni e dell’età del cuore nel report si basano sui dati dello studio di Framingham e sono destinati a individui di età compresa tra 30 e 74 anni che non hanno una storia di malattia cardiovascolare (attacco cardiaco, ictus, arteriopatia periferica o insufficienza cardiaca). Il rischio di malattia coronarica (CHD) di un paziente può essere sovrastimato o sottostimato da questi calcolatori se la loro età non rientra nell’intervallo dell’età di riferimento.”

Nota: Quando nelle impostazioni del software è stato selezionato “PROCAM”, il calcolatore del rischio a 10 anni nel report si basa sui dati dello studio PROCAM ed è utilizzato per stimare il rischio di CHD in uomini di età compresa tra 35 e 65 anni che non hanno una storia di malattie cardiovascolari (attacco cardiaco, ictus, arteriopatia periferica o insufficienza cardiaca). Il rischio di CHD di un paziente può essere sovrastimato o sottostimato da questo calcolatore se la sua età o il sesso non rientrano nei parametri dello studio PROCAM.”

6.7 Terminare l'evento di screening

Dopo aver sottoposto a screening l'ultimo partecipante e aver generato il report, fare clic sul pulsante "Stampa report" per stampare il report del paziente. Altrimenti, fare clic sul pulsante "Termina visita paziente" per tornare alla schermata Data di nascita dell'evento di screening. Quindi, fare clic sul pulsante "Termina evento di screening" per chiudere l'evento per quel giorno.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

srucco
25-09-2018 08:35:18

VISITA IN STUDIO **EVENTO DI SCREENING** TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Evento di screening

Data di nascita:

Mese Giorno Anno

7. Trasferisci risultati test

Utilizzare la modalità "Trasferisci risultati test" per trasferire tutti i record di dati nel misuratore contemporaneamente (anziché singolarmente). Generalmente, questa operazione viene effettuata a fine giornata, quando i pazienti non saranno più presenti.

Nota: Se si pensa di utilizzare questa funzione, occorre registrare il nome di ciascuna persona, la sua data di nascita e il sesso nell'ordine di effettuazione del test. Per utilizzare la calcolatrice di rischio di referto, occorrerà includere anche le seguenti informazioni:

- **Altezza**
- **Peso**
- **Pressione arteriosa**

-E-

- Se fumano, hanno il diabete, sono sottoposti a un trattamento per l'ipertensione o hanno un'anamnesi di attacco cardiaco prematuro (<45 anni)

(Gli utenti al di fuori degli Stati Uniti devono anche registrare i test di controllo, nell'ordine di esecuzione.) Sarà necessario fare riferimento a questo elenco quando si assegnano i dati di test al record paziente o di controllo corretto nel database.

7.1 Esecuzione del trasferimento dei dati collettivo

1. Fare clic sul pulsante Trasferisci risultati test
2. Collegare il misuratore al PC, utilizzando un cavo da USB a mini-USB
3. Fare clic sul pulsante Continua per avviare la trasmissione dei dati

The screenshot shows the 'Mission' software interface. At the top, it says 'Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0'. There are buttons for 'SUPPORTO', 'IMPOSTAZIONI', and 'ESCI'. A user profile for 's Russo' is shown with the date '25-09-2018 08:36:20'. Below this is a navigation bar with four tabs: 'VISITA IN STUDIO', 'EVENTO DI SCREENING', 'TRASFERISCI RISULTATI TEST' (which is highlighted), and 'RECORD PAZIENTI'. The main content area is titled 'Trasferisci risultati test' and contains the following text: 'Da misuratore a PC tramite cavo USB', 'Utilizzare questa funzione per trasferire tutti i risultati dei test dal misuratore al computer.', and 'Collegare il misuratore al computer con il cavo USB.' Below the text are three icons: a photo of the 'Mission Cholesterol' device, a blue 'Connetti' button with a USB symbol, and a box labeled 'PC MEM'. At the bottom, there is a note: 'Per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati, si consiglia di cancellare periodicamente la memoria del misuratore.' followed by a question mark icon and a link: 'Come cancellare la memoria del misuratore?'. A 'Continua' button is at the very bottom.

Nota: Le versioni precedenti del misuratore richiedono la trasmissione manuale dei dati. Se il misuratore richiede la trasmissione manuale, sullo schermo dello strumento verrà visualizzato un elenco di semplici istruzioni dopo aver fatto clic sul pulsante Continua.



SRUSSO

25-09-2018 08:36:51

VISITA IN STUDIO

EVENTO DI SCREENING

TRASFERISCI RISULTATI TEST

RECORD PAZIENTI

Trasferisci risultati test

La versione del misuratore richiede l'intervento manuale.
Seguire i passaggi seguenti per trasferire i dati dal misuratore al PC.



- Con il misuratore spento, tenere premuto il pulsante centrale finché non viene visualizzato Set screen (Imposta schermo).



- Premere il pulsante → finché sullo schermo del misuratore non viene visualizzato il PC.



- Premere una volta il pulsante centrale per abilitare la comunicazione dei dati.



- Premere nuovamente il pulsante centrale per trasferire i dati al PC.



- Per uscire, premere il pulsante ← finché non viene visualizzata la schermata Exit (Esci).



- Premere il pulsante centrale una volta per accedere alla schermata di analisi del misuratore. Premere nuovamente il pulsante centrale per spegnere.

7.2 Assegnazione dei dati di test ai record paziente

1. Prima di passare alla fase successiva, aprire l'elenco dei pazienti creato quando ogni individuo/controllo è stato sottoposto a test. (**Deve** essere nello stesso ordine in cui è stato testato ciascun paziente/controllo). Utilizzare questo elenco come guida per determinare quale record del test appartiene a quale paziente.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.2 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

PrimaryAdministrator
15-03-2019 10:52:19

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING **TRASFERISCI RISULTATI TEST** RECORD PAZIENTI

Trasferisci risultati test

Visualizza record di test

Ricerca paziente

Assegnare un paziente a ogni record di test di seguito oppure contrassegnarlo come controllo.
Usare la casella per selezionare una riga.

	Data	Ora	Chol totale	HDL	Calc. LDL	Trig	Nome paziente	Data di nascita
<input type="checkbox"/>	03-10-2017	09:49	>10.34mmol/L	0.49mmol/L	NA	>7.34mmol/L		
<input type="checkbox"/>	15-02-2018	11:12	<2.59mmol/L	0.44mmol/L	NA	1.14mmol/L		
<input type="checkbox"/>	05-03-2018	15:28	7.19mmol/L	>2.59mmol	NA	< 0.51mmol/L		

Esci Salva in CSV Stampa Blocco

- Al termine del trasferimento dei dati, ogni riga di dati di analisi sarà visualizzata in base alla data e all'ora, in ordine crescente, come sopra illustrato. Selezionare la prima riga mediante la casella di controllo e scegliere tra le tre seguenti funzioni indicate più avanti.
 - Cerca paziente:** per cercare un record paziente esistente nel database del paziente, digitare il nome del paziente (cognome, nome) nella casella di ricerca e selezionare il paziente appropriato dal menu a discesa. Il record paziente si aprirà. Per assegnare la riga evidenziata dei dati del test al record paziente aperto, fare clic su "Salva" o "Salva e stampa report".
 - Aggiungi nuovo:** se un paziente non è sicuramente nel database pazienti, fare clic sul pulsante "Aggiungi nuovo". Si aprirà un nuovo record paziente. Completare i campi con tutte le informazioni disponibili. Per assegnare la riga evidenziata dei dati del test al record paziente aperto, fare clic su "Salva" o "Salva e stampa report".
 - Contrassegna come controllo:** se i dati del test appartengono a un controllo liquido, fare clic sul pulsante "Contrassegna come controllo", che invierà i dati del test al registro della soluzione di controllo. (Se si utilizza un misuratore USA, i controlli saranno riconosciuti dal software e inviati automaticamente al registro della soluzione di controllo).
- Ogni volta che viene eseguita una di queste tre funzioni, vengono visualizzate le righe dei dati del test, insieme al nome del paziente a cui sono stati assegnati i dati (o se è stato assegnato al registro della soluzione di controllo). Continuare ad assegnare righe di dati di test (dal basso verso l'alto) finché non sono stati tutti assegnati.

Nota: Se l'utente ritiene necessario allontanarsi dal computer durante l'assegnazione dei dati di test ai record dei pazienti, è possibile bloccare la sessione per motivi di sicurezza, premendo il pulsante "Blocco" in fondo alla schermata. Tuttavia, se un altro utente eseguirà l'accesso durante il blocco dello schermo, tutte le modifiche non salvate saranno perse. Se esiste tale possibilità, stampare o salvare lo schermo in un file CSV prima di bloccare lo schermo. I dati dei test potranno essere ritrasferiti in un secondo momento.

Mission® Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.2 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

PrimaryAdministrator
15-03-2019 10:52:42

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING **TRASFERISCI RISULTATI TEST** RECORD PAZIENTI

Trasferisci risultati test

Visualizza record di test

Ricerca paziente

Assegnare un paziente a ogni record di test di seguito oppure contrassegnarlo come controllo.
Usare la casella per selezionare una riga.

	Data	Ora	Chol totale	HDL	Calc. LDL	Trig	Nome paziente	Data di nascita
<input type="checkbox"/>	03-10-2017	09:49	>10.34mmol/L	0.49mmol/L	NA	>7.34mmol/L	Assegnato a registro di controllo	
<input type="checkbox"/>	15-02-2018	11:12	<2.59mmol/L	0.44mmol/L	NA	1.14mmol/L	Brown, Mike	01-01-1970
<input type="checkbox"/>	05-03-2018	15:28	7.19mmol/L	>2.59mmol	NA	< 0.51mmol/L	Garcia, Daniel	01-01-1970

Esci Salva in CSV Stampa Blocco

8. Record pazienti

La modalità Record pazienti fornisce un modo rapido per accedere ai record dei pazienti esistenti e rivedere gli eventi di screening passati.

8.1 Accesso ai record pazienti esistenti

Fare clic sul pulsante Record pazienti. Questa operazione aprirà automaticamente la scheda Database pazienti. Per cercare un record paziente:

1. Inserire il cognome, il nome, la data di nascita o il numero ID del paziente nella casella di ricerca. Fare clic sul pulsante di ricerca.



sruaso

25-09-2018 08:56:36

VISITA IN STUDIO

EVENTO DI SCREENING

TRASFERISCI RISULTATI TEST

RECORD PAZIENTI

Record Pazienti

Database pazienti

Evento di screening

Tutti i record dei pazienti sono elencati di seguito per impostazione predefinita. Utilizzare la casella di ricerca per filtrare.

Alfonsi



Ricerca per cognome, nome, Data di nascita o n. ID

Cognome	Nome	Data di nascita	ID paziente
Alfonsi	Roberto	01-01-1970	89756



sruoso

25-09-2018 08:58:12

VISITA IN STUDIO

EVENTO DI SCREENING

TRASFERISCI RISULTATI TEST

RECORD PAZIENTI

Record Pazienti

Database pazienti

Evento di screening

Tutti i record dei pazienti sono elencati di seguito per impostazione predefinita. Utilizzare la casella di ricerca per filtrare.




Ricerca per cognome, nome, Data di nascita o n. ID

Cognome	Nome	Data di nascita	ID paziente
Alfonsi	Roberto	01-01-1970	89756
Bianchi	Nina	01-01-1970	85797
Marino	Marco	01-01-1970	89756
Ricci	Luca	01-01-1970	83126
Romano	Angelo	01-01-1970	86513

2. Identificare il paziente corretto nell'elenco visualizzato e fare clic sulla riga corrispondente delle informazioni sul paziente per aprire il record corrispondente.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI


 **SRUSSO**
25-09-2018 08:58:12

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Record Pazienti

Database pazienti Evento di screening

Tutti i record dei pazienti sono elencati di seguito per impostazione predefinita. Utilizzare la casella di ricerca per filtrare.

 Ricerca per cognome, nome, Data di nascita o n. ID

Cognome	Nome	Data di nascita	ID paziente
Alfonsi	Roberto ←	01-01-1970	89756
Bianchi	Nina	01-01-1970	85797
Marino	Marco	01-01-1970	89756
Ricci	Luca	01-01-1970	83126
Romano	Angelo	01-01-1970	86513

- Il record paziente visualizzato può essere esportato in un file CSV, salvato o salvato/stampato. Ognuna di queste tre funzioni riporterà alla scheda Record pazienti, Database pazienti.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

srusso
25-09-2018 08:45:21

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Record Pazienti

Database pazienti Evento di screening

Record paziente esistente - I campi possono essere modificati se necessario

* Obbligatorio

Ultimo aggiornamento:
25-09-2018, 08:39:59

* Nome: * Cognome: ID paziente:

* Data di nascita:

* Sesso: Donna Uomo

Segni vitali: * Altezza: (cm) * Peso: (kg) * Pressione arteriosa: (Sis / Dia) /

* Tabacismo? Si No


Annulla Salva Esporta file CSV Salva e stampa report

- Per visualizzare un elenco di tutti i record pazienti nel database, cancellare il testo dalla casella di ricerca e fare clic sul pulsante di ricerca.
- Per uscire dalla modalità Record pazienti, fare semplicemente clic su una delle schede nella barra di navigazione secondaria: Visita in studio, Evento di screening o Trasferisci risultati test.

8.2 Accesso agli eventi di screening precedenti

Nella modalità Record pazienti, fare clic sulla scheda Evento di screening. Per cercare un evento di screening precedente:

1. Utilizzare il nome dell'Evento di screening e/o l'intervallo di date dell'evento per cercare l'Evento di screening desiderato.

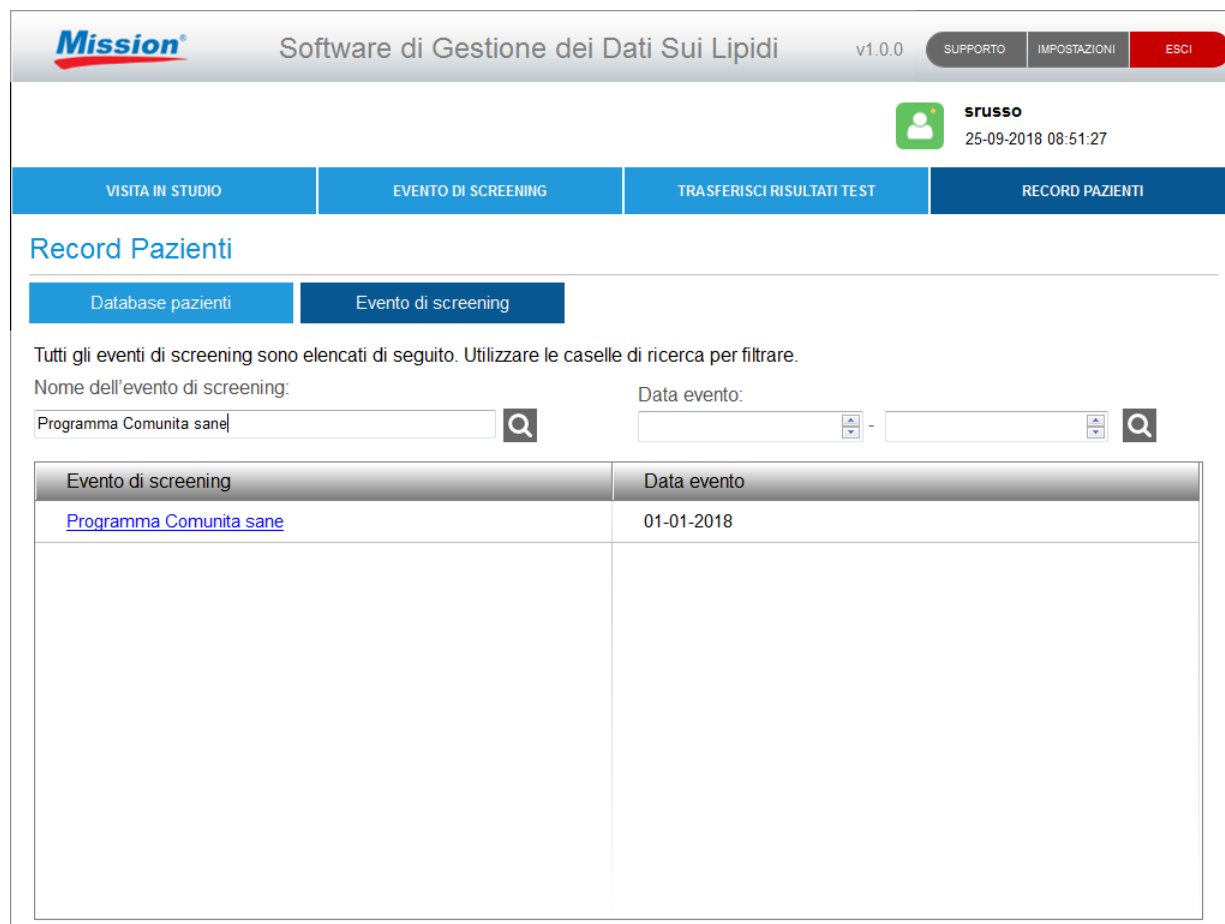


The screenshot shows the 'Mission' software interface for lipid data management. The top navigation bar includes the logo, the title 'Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi', version 'v1.0.0', and buttons for 'SUPPORTO', 'IMPOSTAZIONI', and 'ESCI'. The user profile 'SRUSSO' is shown with the date and time '25-09-2018 08:51:27'. The main navigation menu has four items: 'VISITA IN STUDIO', 'EVENTO DI SCREENING', 'TRASFERISCI RISULTATI TEST', and 'RECORD PAZIENTI'. The 'RECORD PAZIENTI' section is active, showing a sub-menu with 'Database pazienti' and 'Evento di screening'. Below this, a message states: 'Tutti gli eventi di screening sono elencati di seguito. Utilizzare le caselle di ricerca per filtrare.' There are two search fields: 'Nome dell'evento di screening:' with the value 'Programma Comunita sane' and a search icon, and 'Data evento:' with empty date pickers and a search icon. A table below displays the search results:

Evento di screening	Data evento
Programma Comunita sane	01-01-2018

2. Identificare l'Evento di screening corretto nell'elenco visualizzato e fare clic sul nome dell'evento corrispondente.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI



 **srusso**
25-09-2018 08:51:27


VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Record Pazienti

Database pazienti Evento di screening

Tutti gli eventi di screening sono elencati di seguito. Utilizzare le caselle di ricerca per filtrare.

Nome dell'evento di screening:  Data evento: - 

Evento di screening	Data evento
Programma Comunita sane 	01-01-2018

3. Nella finestra di ricerca verrà visualizzato un elenco dei partecipanti all'evento. È possibile accedere al record di ciascun partecipante facendo clic sul nome del partecipante.

Mission Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi v1.0.0 SUPPORTO IMPOSTAZIONI ESCI

srucco
25-09-2018 08:47:06

VISITA IN STUDIO EVENTO DI SCREENING TRASFERISCI RISULTATI TEST RECORD PAZIENTI

Record Pazienti

Database pazienti Evento di screening

Tutti i pazienti nell'evento screening Programma Comunità sane

Cognome	Nome	Data di nascita
Alfonsi	Roberto ←	01-01-1970
Bianchi	Nina	01-01-1970
Marino	Marco	01-01-1970
Ricci	Luca	01-01-1970

Esci

4. Il record paziente visualizzato può essere esportato in un file CSV, salvato o salvato/stampato. Ognuna di queste tre funzioni riporterà all'elenco dei partecipanti per l'evento specifico.

The screenshot shows the 'Mission' software interface for 'Software di Gestione dei Dati Sui Lipidi' (Lipid Data Management Software). The user is logged in as 'sruoso' on 25-09-2018 at 08:47:57. The main navigation bar includes 'VISITA IN STUDIO', 'EVENTO DI SCREENING', 'TRASFERISCI RISULTATI TEST', and 'RECORD PAZIENTI'. The 'RECORD PAZIENTI' section is active, showing a 'Record paziente esistente - I campi possono essere modificati se necessario' (Existing patient record - Fields can be modified if necessary) message. The form contains the following fields:

- Obbligatorio** (Required):
 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018, 08:39:59
 - Nome: Roberto
 - Cognome: Alfonsi
 - ID paziente: 89756
 - Data di nascita: Gen, 01, 1970
 - Sesso: Donna, Uomo
- Segni vitali** (Vital signs):
 - Altezza: (cm) 180.0
 - Peso: (kg) 75.0
 - Pressione arteriosa: (Sis / Dia) 100 / 80
- Tabacismo?** (Smoking status): Si, No

At the bottom, there are four buttons: 'Annulla' (Cancel), 'Salva' (Save), 'Esporta file CSV' (Export CSV file), and 'Salva e stampa report' (Save and print report).

5. Per uscire dalla modalità Record pazienti, fare semplicemente clic su una delle schede nella barra di navigazione secondaria: Visita in studio, Evento di screening o Trasferisci risultati test.

9. Sicurezza del computer

Per la sicurezza dei dati dei pazienti, il software di gestione dei dati sui lipidi Mission fornisce le seguenti funzionalità:

- Dati pazienti memorizzati crittografati
- Timeout automatico dopo 20 minuti di inattività
- Accesso protetto da password